

Corset C.T.M. - Chêneau

Indications :

Ce corset convient aux traitements :

- Des scolioses :
dorsale, double majeure, dorsolombaire, et lombaire à forte rotation vertébrale.

Réalisation d'après :

- Un moulage plâtré et prise de mesures.
- CFAO "RT Scan"
- Radios récentes du rachis de face et de profil en entier, indispensables.

Exemple de prescription :

- Corset Chêneau ou C.T.M.
- Préciser les courbures et les angulations.
- Prescription du moulage sur cadre, si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

Il constitué :

- D'une coque mono valve à ouverture antérieure en polypropylène doublée ou non d'une mousse cellulaire.
- D'appuis encastrés ou préformés aux niveaux des gibbosités, et de fenêtres d'expansion en regard de ces appuis.
- D'une fermeture rigide abdominale.
- D'une fermeture sternale souple.

Options/Variantes :

- Des appuis adaptés à la morphologie des gibbosités en mousse haute densité, peuvent être ajoutés aux dépressions du corset
- Quelques jours d'adaptation progressive sont indispensables pour arriver à un port permanent.

Port/Entretien :

- Il est porté en général à temps complet soit 23 heures sur 24, ou plus rarement à temps partiel à la maison soit une douzaine d'heures.
- La pratique hebdomadaire du sport est autorisée.
- Il doit être contrôlé régulièrement en fonction de la croissance et des éventuels problèmes cutanés.
- Il est associé à une kinésithérapie active en corset.
- Il peut être entretenu régulièrement à l'eau savonneuse, puis séché

parfaitement.